



ZÁKAZ MANIPULACE  
S OHNĚM



ZÁKAZ KOUŘENÍ



ZÁKAZ STYKU S TUKY  
A MASTNÝMI PRVKY

- Doporučený průtok O<sub>2</sub>:  
1-2 l/min. u dětí max., 2-5 l/min. dospělý max.

- Pro obsah zvlhčovače volte destilovanou H<sub>2</sub>O + doporučené příměsi dle výrobce.

- Doporučená délka inhalace: 10 - 20min.

- Přísný ZÁKAZ manipulace s otevřeným ohněm, styku s tuky a mastnými prvky při manipulaci s láhví a v průběhu kyslíkové terapie!

**Dodržujte pokyny pro manipulaci a skladování uvedené v příloženém bezpečnostním listu.**

## POSTUP ZAPOJENÍ KYSLÍKOVÉHO SETU

PŘIPOJENÍ KYSLÍKOVÝCH BRÝLÍ / MASKY



1

OTEVŘENÍ HLAVNÍHO VENTILU



2

NASAZENÍ KYSLÍKOVÝCH BRÝLÍ / MASKY



3

NASTAVENÍ PRŮTOKU KYSLÍKU



4

## S POUŽITÍM ZVLHČOVAČE

NAPLNĚTE NÁDOBU ZVLHČOVAČE



1

PŘIPOJTE ZVLHČOVAČ K PŘÍVODU KYSLÍKU



2

PŘIPOJTE KYSLÍKOVÉ BRÝLE / MASKU



3

OTEVŘETE HLAVNÍ VENTIL



4

NASAŽTE KYSLÍKOVÉ BRÝLE / MASKU



5

NASTAVTE PRŮTOK KYSLÍKU



6



SERVIS  
kyslik@cylinders.cz • mujkyslik.cz

Cylinders Engineering Services, a.s.  
Vítkovice 3020 • 703 00 Ostrava • CZECH REPUBLIC  
www.cylinders.cz

